

упаковка с замком zip сохранит ваши маски чистыми

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО

соответствует Типу I согласно ГОСТ Р 58396 "Маски медицинские"
производится по ТУ 13.95.10-001-0197670938-2020



ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ

- 1 Откройте упаковку, достаньте 1 маску, плотно закройте

Заведите ушные петли за уши

2

Обеспечьте плотное прилегание маски по сторонам лица

5



Прижмите носовой фиксатор

3

Растяните маску вниз до подбородка

4

6

Маска строго одноразовая
Следует сменить маску после 2-3 часов использования или если маска стала влажной

7

Снимайте маску, держа за ушные петли
Утилизируйте маску согласно правилам утилизации медицинских изделий

8

Вымойте руки после утилизации маски

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Слой 1 - гидрофобный нетканый материал Спанбонд/СМС
Слой 2 - высококачественный фильтр Мельтблаун/СМС
Слой 3 - абсорбирующий влагу комфортный материал СМС
Ушные петли - шнур эластичный
Носовой фиксатор - с проволочным сердечником

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом месте при температуре от 0 до + 40 °С в местах, недоступных детям

УТИЛИЗАЦИЯ МАСОК:

смотри инструкцию

СРОК ГОДНОСТИ: 60 месяцев от даты изготовления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

только для наружного применения

При обнаружении чувствительности к материалам маски прекратить использование

ДАТА ПР-ВА:

НОМЕР ПАРТИИ:

ПРОИЗВЕДЕНО: **FT MASK** / ИП Циклаури М. Г.
108820, г. Москва, ул. Адмирала Корнилова,
вл. 55, стр. 1, пом. 44

support@ftmask.ru • www.ftmask.ru

